
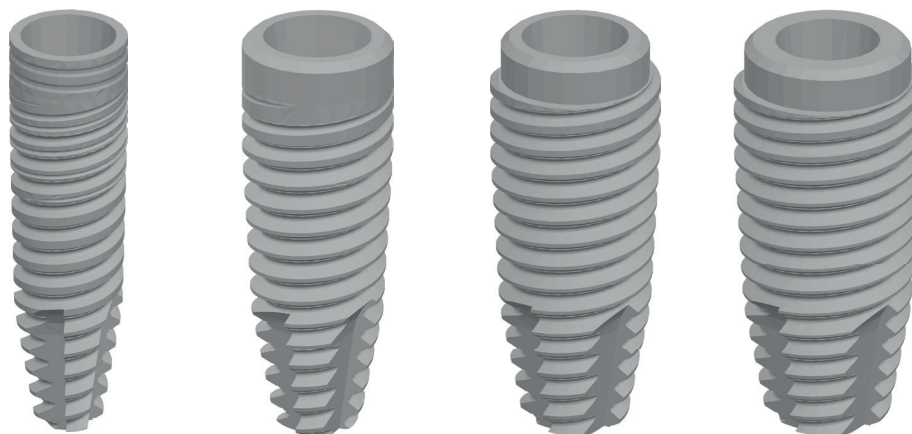


Konik-OS Standard

La particolare morfologia dell'impianto Standard lo rende dedicato a tipologie di osso D1 e D2.

Diametro	7mm	8.5mm	10mm	11.5mm	13mm	15mm
● Ø 3.0 mm	--	KS0830	KS1030	KS1130	KS1330	--
● Ø 3.5 mm	--	KS0835	KS1035	KS1135	KS1335	--
● Ø 4.0 mm	KS0740	KS0840	KS1040	KS1140	KS1340	KS1540
● Ø 4.5 mm	KS0745	KS0845	KS1045	KS1145	KS1345	KS1545

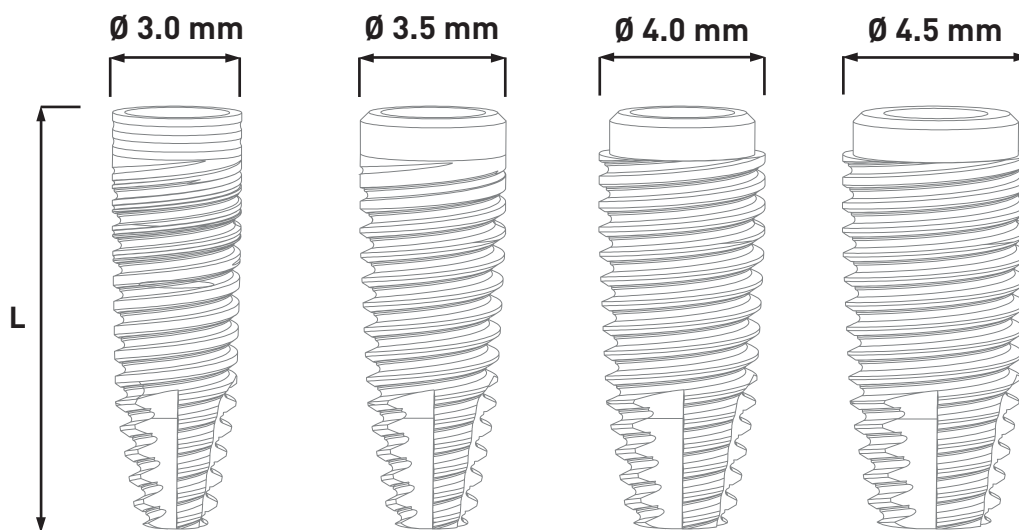

Protocollo chirurgico

Osso tipo D1 / D2					
Torque d'inserimento 45/55 Ncm					
Codice	Descrizione	Ø 3.0 mm	Ø 3.5 mm	Ø 4.0 mm	Ø 4.5 mm
FPD20	Fresa pilota Ø 2.0 mm	●	●	●	●
FCD25	Fresa chirurgica Ø 2.5 mm	●	●	●	●
FCD28	Fresa chirurgica Ø 2.8 mm	●	●	●	●
FCD33	Fresa chirurgica Ø 3.3 mm	--	●	●	●
FCD38	Fresa chirurgica Ø 3.8 mm	--	--	●	●
FCD43	Fresa chirurgica Ø 4.3 mm	--	--	--	●
CSD30	Preparatore di spalla Ø 3.0 mm	●	--	--	--
CSD35	Preparatore di spalla Ø 3.5 mm	--	●	--	--
CSD40	Preparatore di spalla Ø 4.0 mm	--	--	●	--
CSD45	Preparatore di spalla Ø 4.5 mm	--	--	--	●

Osso tipo D3 / D4					
Torque d'inserimento 45/55 Ncm					
Codice	Descrizione	Ø 3.0 mm	Ø 3.5 mm	Ø 4.0 mm	Ø 4.5 mm
FPD20	Fresa pilota Ø 2.0 mm	●	●	●	●
FCD25	Fresa chirurgica Ø 2.5 mm	●	●	●	●
FCD28	Fresa chirurgica Ø 2.8 mm	●	●	●	●
FCD33	Fresa chirurgica Ø 3.3 mm	--	--	●	●
FCD38	Fresa chirurgica Ø 3.8 mm	--	--	--	●
FCD43	Fresa chirurgica Ø 4.3 mm	--	--	--	--