


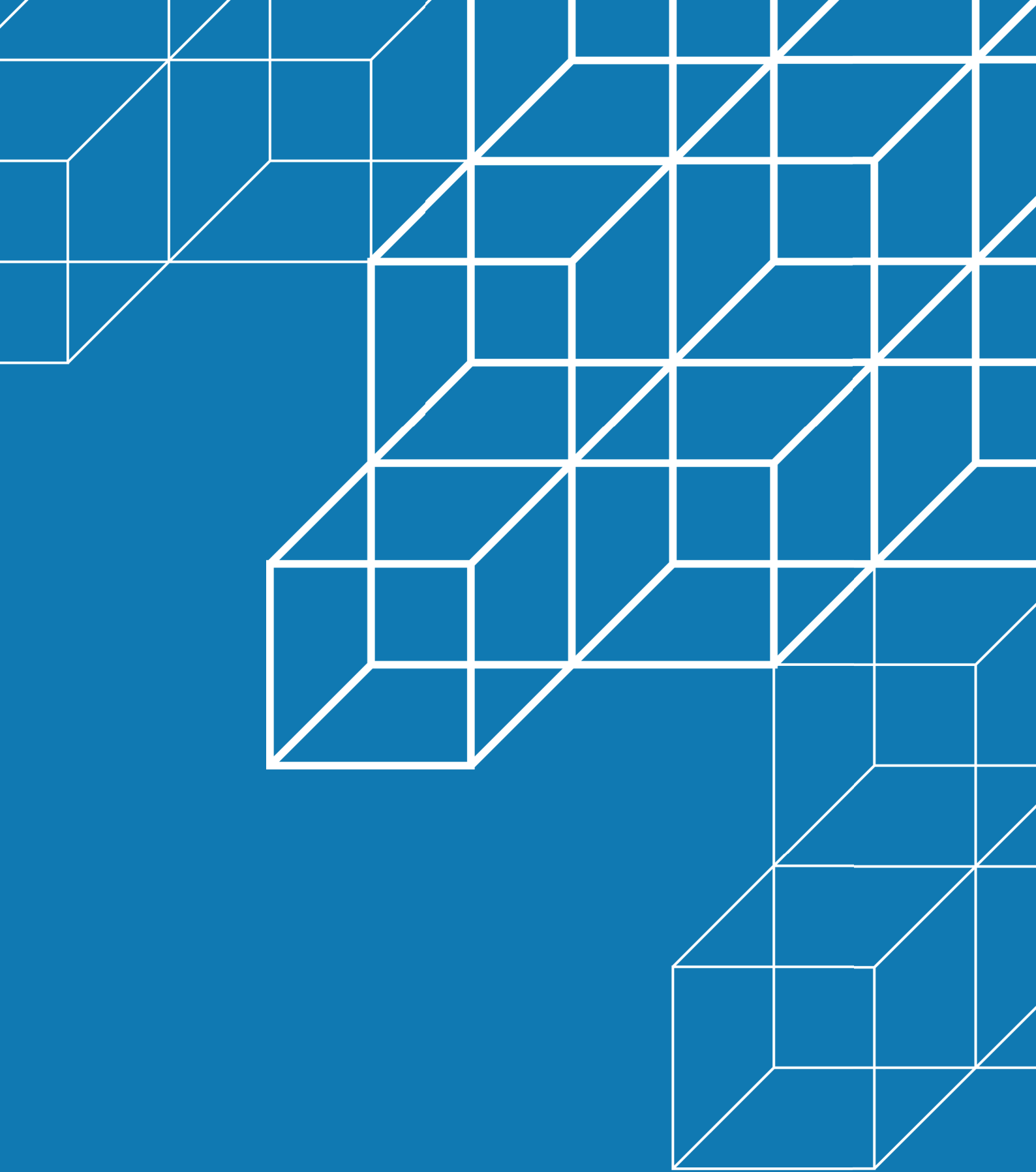

# PROTESICA

Un'unica piattaforma protesica per impianti Konik-OS Standard e Konik-OS Plus.

# Abbreviazioni protesica


|               |                                |                |
|---------------|--------------------------------|----------------|
| <b>VG</b>     | Vite di guarigione             | <i>Pag. 29</i> |
| <b>TPUK</b>   | Transfer pick-up               | <i>Pag. 29</i> |
| <b>CSOPMK</b> | Cappetta snap-on per montatore | <i>Pag. 29</i> |
| <b>ANAK</b>   | Analogo analogico              | <i>Pag. 30</i> |
| <b>AD</b>     | Abutment dritto                | <i>Pag. 30</i> |
| <b>AA</b>     | Abutment angolato              | <i>Pag. 31</i> |
| <b>KAS</b>    | Konik-OS Attacco a pallina     | <i>Pag. 32</i> |
| <b>BAL</b>    | Cappetta                       | <i>Pag. 32</i> |
| <b>KL</b>     | Locator®                       | <i>Pag. 33</i> |
| <b>CRLK</b>   | Cappetta ritenzione Locator®   | <i>Pag. 33</i> |
| <b>MUKA</b>   | MUA Angolati                   | <i>Pag. 34</i> |
| <b>MUKD</b>   | MUA Dritti                     | <i>Pag. 35</i> |
| <b>AMA</b>    | Analogo MUA analogico          | <i>Pag. 35</i> |
| <b>TPUM</b>   | Transfer MUA                   | <i>Pag. 35</i> |
| <b>TTM</b>    | Torretta titanio MUA           | <i>Pag. 35</i> |
| <b>VGM</b>    | Vite di guarigione MUA         | <i>Pag. 35</i> |
| <b>TCM</b>    | Torretta calcinabile MUA       | <i>Pag. 35</i> |

## Legenda

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>HT</b>    | Altezza transmucosa |
| <b>D (Ø)</b> | Diametro            |

# Viti di guarigione standard

Disponibili in 3 altezze del tragitto transmucoso con vite di serraggio inglobata a funzione di estrattore.

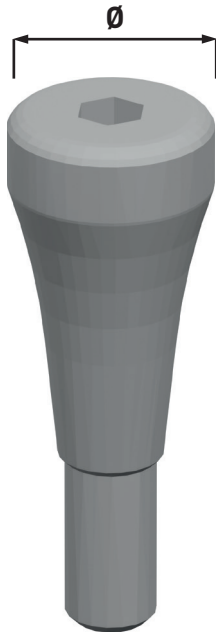

| Descrizione                     | Codice |
|---------------------------------|--------|
| Vite di Guarigione HT 1,5 D 3.5 | VG1535 |
| Vite di Guarigione HT 2,5 D 3.5 | VG2535 |
| Vite di Guarigione HT 3,5 D 3.5 | VG3535 |
| Vite di Guarigione HT 1,5 D 4.0 | VG1540 |
| Vite di Guarigione HT 2,5 D 4.0 | VG2540 |
| Vite di Guarigione HT 3.5 D 4.0 | VG3540 |
| Vite di Guarigione HT 1,5 D 4.5 | VG1545 |
| Vite di Guarigione HT 2,5 D 4.5 | VG2545 |
| Vite di Guarigione HT 3,5 D 4.5 | VG3545 |

## Transfer pick-up

Il transfer pick-up ha una superficie di appoggio piatta che garantisce il trasferimento della perfetta e unica posizione dell'impianto.



**TPUK**  
Transfer pick-up

## Cappetta snap-on


Per poter eseguire un'impronta con transfer a strappo utilizzando il mounter e ottenere un certo riposizionamento dello stesso, si può utilizzare la cappetta snap-on inserendola sopra il mounter prima di effettuare l'impronta.



**CSOPMK**  
Cappetta snap-on per montatore

**Raccomandazione: Tutte le viti protesiche devono essere serrate a non oltre 15 Newton.**

# Analogo analogico

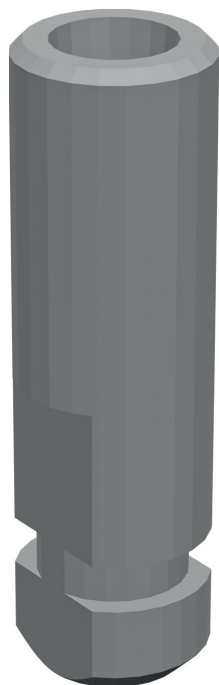

## ANAK

Analogo analogico

# Abutment dritti



Disponibili in 3 altezze del tragitto transmucoso con vite di serraggio inglobata a funzione di estraattore.


| Descrizione            | Codice |
|------------------------|--------|
| Abutment Dritto HT 1,5 | AD15   |
| Abutment Dritto HT 2,5 | AD25   |
| Abutment Dritto HT 3,5 | AD35   |

Raccomandazione: Tutte le viti protesiche devono essere serrate a non oltre **15 Newton**.

# Abutment angolati 17° & 25°


Gli abutment angolati sono disponibili in tre altezze del tragitto transmucoso e sono equipaggiati con viti di serraggio inglobate che funzionano anche come estrattori.

## Abutment angolati - 17°

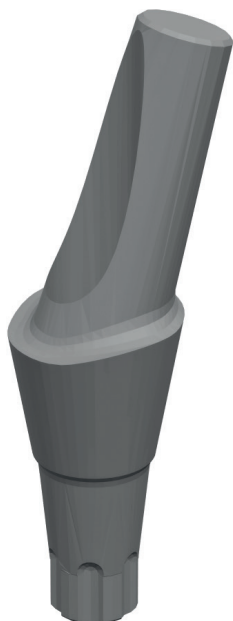

| Descrizione                  | Codice |
|------------------------------|--------|
| Abutment Angolato HT 1,5 17° | AA1517 |
| Abutment Angolato HT 2,5 17° | AA2517 |
| Abutment Angolato HT 3,5 17° | AA3517 |

## Abutment angolati - 25°

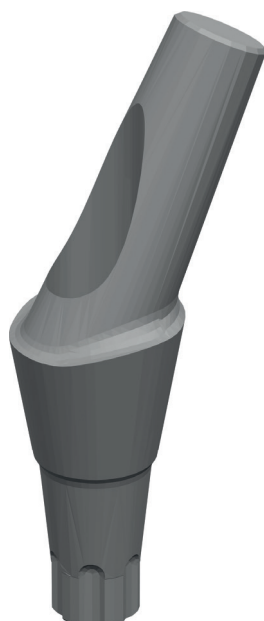

| Descrizione                  | Codice |
|------------------------------|--------|
| Abutment Angolato HT 1,5 25° | AA1525 |
| Abutment Angolato HT 2,5 25° | AA2525 |
| Abutment Angolato HT 3,5 25° | AA3525 |

# Attacchi a sfera per protesi overdenture



## Attacchi a sfera - Ø 3,5 mm

| Descrizione                     | Codice  |
|---------------------------------|---------|
| Attacco a sfera HT 2 - Ø 3,5 mm | KAS0235 |
| Attacco a sfera HT 3 - Ø 3,5 mm | KAS0335 |
| Attacco a sfera HT 4 - Ø 3,5 mm | KAS0435 |



### BAL-MC

Cappetta metallica



### BAL-SCH

Silicone duro



### BAL-SCS

Silicone morbido

Tutte le componenti protesiche sono prodotte in lega di titanio Ti6Al4V ELI (Grado 23)

# LOCATOR®



LOCATOR® - Ø 3,5 mm

| Descrizione              | Codice |
|--------------------------|--------|
| LOCATOR® HT 2 - Ø 3,5 mm | KL0235 |
| LOCATOR® HT 3 - Ø 3,5 mm | KL0335 |
| LOCATOR® HT 4 - Ø 3,5 mm | KL0435 |




## CRLK

Cappetta ritenzione LOCATOR®

Tutte le componenti protesiche sono prodotte in lega di titanio Ti6Al4V ELI (Grado 23)


# Abutment multi-unit angolati

## Abutment Multi-Unit angolati - 17°

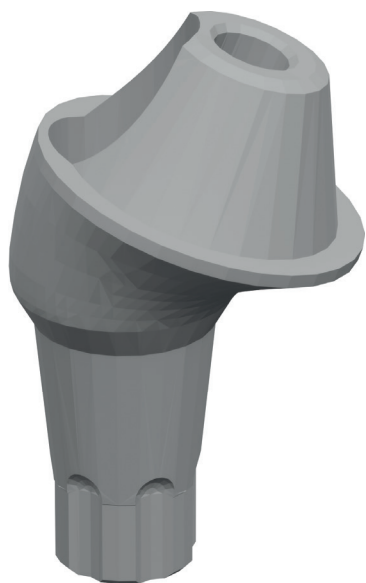

| Descrizione                        | Codice   |
|------------------------------------|----------|
| Abutment Multi-Unit - 17° - HT 1,5 | MUKA1517 |
| Abutment Multi-Unit - 17° - HT 2,5 | MUKA2517 |
| Abutment Multi-Unit - 17° - HT 3,5 | MUKA3517 |


## Abutment Multi-Unit angolati - 30°

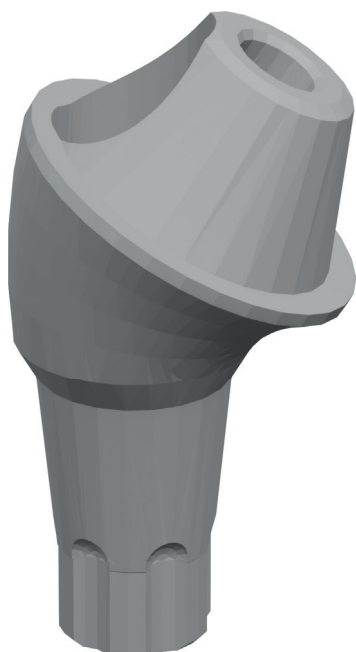

| Descrizione                        | Codice   |
|------------------------------------|----------|
| Abutment Multi-Unit - 30° - HT 1,5 | MUKA1530 |
| Abutment Multi-Unit - 30° - HT 2,5 | MUKA2530 |



# Abutment multi-unit dritti

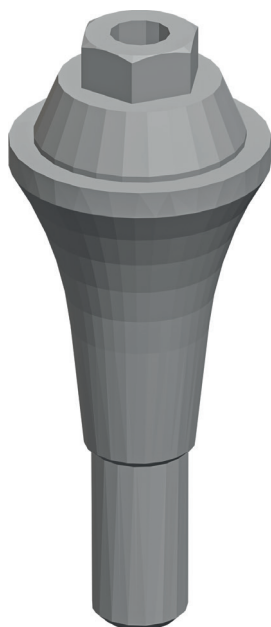

| Descrizione                       | Codice |
|-----------------------------------|--------|
| Abutment Multi-Unit Dritto HT 1,5 | MUKD15 |
| Abutment Multi-Unit Dritto HT 2,5 | MUKD25 |
| Abutment Multi-Unit Dritto HT 3,5 | MUKD35 |


## Componentistica multi-unit



**AMA**  
Analogo  
MUA  
analogico



**TPUM**  
Transfer  
MUA  
+ Vite Lunga

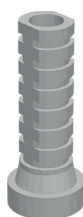

**TTM**  
Torretta  
Titanio  
MUA + Vite



**VGM**  
Vite di  
Guarigione  
MUA



**TCM**  
Torretta  
Calcinabile  
MUA + Vite